

# **Manual de limpieza y desinfección de PicoSure**

## **Cuidado y manejo: Exterior del sistema**

Cynosure recomienda a los operadores limpiar y desinfectar periódicamente el exterior del sistema láser. Apague siempre el sistema antes de limpiarlo.

### **Limpieza del exterior del sistema**

1. Usando un paño suave, limpie el exterior del sistema láser con agua y un jabón suave.
2. Cuando sea necesario, mediante un paño suave, desinfecte los componentes exteriores del equipo con un desinfectante de uso hospitalario, siguiendo el protocolo de desinfección de su clínica.

### **Limpieza de la pantalla**

1. Prepare una solución con agua y un jabón suave.  
**ATENCIÓN: No utilice disolventes orgánicos ni soluciones ácidas o alcalinas para limpiar la pantalla, ya que podrían dañarla.**
2. Sumerja un paño suave en la solución y escúrralo.
3. Limpie la superficie de la pantalla con el paño humedecido.

## Cuidado y manejo: Piezas de mano y puntas de tratamiento

**NOTA:** A continuación se dan recomendaciones para la limpieza y la desinfección/esterilización de alto nivel de las superficies que entran en contacto con los pacientes, así como para la limpieza y la desinfección de las superficies sin contacto con los pacientes, de las piezas de mano de PicoSure. La responsabilidad final del control de infecciones en la clínica corresponde a la propia clínica donde se llevan a cabo estos procedimientos. La clínica tiene la obligación de seguir todas las directrices aplicables que establecen los CDC y la FDA con respecto al control de infecciones para equipos médicos reutilizables.

**ATENCIÓN:** Utilice gafas protectoras, delantal y guantes al manipular la solución de limpieza.

**ATENCIÓN:** No sumerja el espaciador, la herramienta de calibración ni la lente fraccionada Focus.

**ATENCIÓN:** Desmonte siempre la punta de tratamiento del espaciador o de la lente fraccionada antes de la limpieza y la desinfección (consulte las instrucciones de desmontaje en la página 58).

### Limpieza de la punta de tratamiento de 755 nm

1. Inmediatamente después del uso, enjuague la punta de tratamiento de la pieza de mano con agua corriente templada para eliminar cualquier resto de suciedad visible.
2. Prepare una solución de limpieza enzimática suave, como Endozime® AW Triple Plus con APA, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Sumerja la punta de tratamiento en la solución preparada durante 2 minutos como mínimo.
4. Retire la punta de tratamiento de la solución de limpieza y enjuáguela a fondo con agua corriente templada durante al menos 20 segundos para eliminar los restos de suciedad.
5. Inspeccione la punta de tratamiento. Si quedan restos de suciedad, repita los pasos 3-4.
6. Esterilice la punta inmediatamente después de limpiarla, si es posible.

### Limpieza de las puntas de tratamiento de 532 nm y 1064 nm

1. Inmediatamente después del uso, enjuague la punta de tratamiento de la pieza de mano con agua corriente templada para eliminar cualquier resto de suciedad visible.
2. Prepare una solución de limpieza enzimática suave, como Endozime® AW Triple Plus con APA, siguiendo las instrucciones del fabricante.
3. Sumerja la punta de tratamiento en la solución preparada durante 2 minutos como mínimo. A continuación, mantenga la punta de tratamiento sumergida en la solución y frote las superficies interiores con un cepillo de cerdas suaves, como el cepillo Gordon (número de componente: 435151).
4. Retire la punta de tratamiento de la solución de limpieza y enjuáguela a fondo con agua corriente templada durante al menos 20 segundos para eliminar los restos de suciedad.
5. Inspeccione la punta de tratamiento. Si quedan restos de suciedad, repita los pasos 3-4.
6. Esterilice la punta inmediatamente después de limpiarla, si es posible.

## Desinfección/esterilización de las puntas de tratamiento

### Desinfección/esterilización química

**IMPORTANTE:** Estas instrucciones solo son aplicables a la punta de tratamiento de 755 nm.

**ATENCIÓN:** Siga las instrucciones del fabricante acerca de la protección personal al manipular el desinfectante/esterilizante químico.

Después de la limpieza, sumerja la punta de tratamiento en una solución desinfectante y esterilizante de alto nivel autorizada por la FDA, como Cidex Plus® 28 Day Solution (glutaraldehído al 3,4%). El tiempo mínimo de inmersión, según la etiqueta de la solución Cidex Plus®, es de 10 horas a 25 °C para la esterilización y de 20 minutos a 25 °C para la desinfección de alto nivel.

### Esterilización por vapor

**IMPORTANTE:** Estas instrucciones son aplicables a todas las puntas de tratamiento.

- 1 Después de la limpieza, coloque la punta de tratamiento en una bolsa de esterilización con cierre hermético. La bolsa debe ser suficientemente grande para contener la punta de tratamiento sin que el cierre hermético quede en tensión.
- 2 Coloque la bolsa en un autoclave.
- 3 Seleccione los parámetros del autoclave que se indican en la tabla siguiente:

Temperatura	Tiempo	Tipo de ciclo	Tiempo mínimo de secado
134 °C	5 minutos	Prevacío	10 minutos
132 °C	25 minutos	Gravedad	10 minutos

## Limpieza y desinfección de los componentes de la pieza de mano

**NOTA:** Los componentes de la pieza de mano incluyen el cuerpo de la pieza de mano, los espaciadores, la lente fraccionada Focus, la punta de calibración y los adaptadores de la pieza de mano.

Después de cada procedimiento, se recomienda limpiar todas las superficies de los componentes de la pieza de mano que no entran en contacto con el paciente, incluidas las ventanas protectoras situadas en el espaciador de la pieza de mano fija y en el cuerpo de la pieza de mano con zoom. Utilice las técnicas de limpieza y desinfección aplicables, de acuerdo con las pautas que siga su clínica.