

# Manual de limpieza y desinfección de SculpSure

## Cuidado y manejo: Exterior del sistema

Cynosure recomienda a los operadores limpiar periódicamente el exterior del sistema láser. Apague siempre el sistema antes de limpiarlo. Durante la limpieza, utilice ropa y gafas de protección, de acuerdo con las instrucciones del fabricante del producto de limpieza.

### Limpieza del exterior del sistema, el lazo y la base (componentes que no entran en contacto con el cliente).

1. Mediante un paño suave, limpie las superficies exteriores del sistema, así como el lazo y la base, con agua y un jabón suave.
2. Cuando sea necesario, limpie con alcohol isopropílico del 70%.

### Limpieza de la pantalla.

1. Prepare una solución con agua y un jabón suave.



**ATENCIÓN:** No utilice disolventes orgánicos ni soluciones ácidas o alcalinas para limpiar la pantalla, ya que podrían dañarla.

2. Sumerja un paño suave en la solución y escúrralo.
3. Limpie la superficie de la pantalla con el paño humedecido.

### Limpieza del cinturón y las hebillas.

1. Limpie el cinturón y las hebillas después de cada uso.
2. Después del uso, retire el cinturón del marco y enjuague las piezas con agua corriente templada para eliminar cualquier resto de suciedad visible. No quite las hebillas del cinturón.
3. Sumerja el cinturón y las hebillas durante al menos 15 minutos en alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%.
4. Retire el cinturón y las hebillas de la solución de limpieza y deje que se sequen completamente, durante 15 minutos como mínimo, antes de volver a utilizarlos.

### Limpieza del botón de pausa.

1. Limpie el botón de pausa después de cada uso.
2. Después del uso, limpie las superficies del botón de pausa que entran en contacto con el cliente mediante un paño limpio humedecido en alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, siguiendo las instrucciones del fabricante. Deseche el paño sucio.
3. A continuación, humedezca un paño limpio con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, y limpie a fondo la superficie de contacto con el cliente durante dos (2) minutos. A continuación, deje el paño en contacto permanente con las superficies que está limpiando durante ocho (8) minutos; para ello, envuelva con el paño las superficies que entran en contacto con el cliente. Deseche el paño después de utilizarlo.
4. Inspeccione visualmente la superficie para comprobar que se haya eliminado toda la suciedad adherida. Repita el proceso de limpieza si es necesario.

(continuación)

5. Deje que las superficies del botón de pausa se sequen por completo antes de usarlas, ya sea al aire o mediante un paño que no desprenda pelusa.

### **Limpieza de la máscara submentoniana**

1. Limpie a fondo la máscara después de cada uso.
2. Después del uso, desmonte la máscara y el marco. Consulte las instrucciones de limpieza del marco que figuran a continuación.
3. Enjuague con agua corriente templada para eliminar cualquier resto de suciedad visible.
4. Limpie a fondo las superficies de la máscara con un paño limpio humedecido con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70% durante 30 segundos como mínimo.
5. Deje secar la máscara al aire.

### **Desinfección de la máscara submentoniana**

1. Tras desmontar la máscara, límpiela a fondo después de cada uso tal como se indica más arriba.
2. Limpie a fondo las superficies del componente con un paño limpio humedecido con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70% durante al menos 1 minuto para su desinfección.
3. Deje secar la máscara al aire.

### **Limpieza de los marcos**

1. Limpie a fondo todos los marcos después de cada uso.
2. Después del uso, desmonte la máscara y el marco y enjuague el marco con agua corriente templada para eliminar cualquier resto de suciedad visible.
3. Sumerja los componentes en agua corriente templada durante 5 minutos como mínimo.
4. Mediante el cepillo suministrado, cepille el marco/plantilla bajo el agua prestando especial atención a las juntas y espacios.
5. Retire los componentes del agua y enjuáguelos de nuevo con agua corriente templada.
6. Limpie todas las superficies con un paño limpio humedecido con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70% y deje que las piezas se sequen al aire.



(continuación)

## Desinfección de los marcos

1. Tras desmontar los componentes, límpielos a fondo después de cada uso tal como se indica más arriba.
2. Sumerja los componentes limpios en alcohol isopropílico (isopropanol) del 70% durante 15 minutos como mínimo.
3. Retire los componentes de la solución y déjelos secar al aire completamente, durante al menos 15 minutos, antes de volver a utilizarlos.

## Limpieza del aplicador


1. Limpie a fondo las superficies del aplicador que entran en contacto con el cliente después de cada uso.
2. Moje el cepillo suministrado con agua corriente templada, sacuda el exceso de agua y cepille suavemente la superficie del aplicador, prestando especial atención a las hendiduras situadas alrededor de los bloques de detección de contacto de color gris.
3. Humedezca un paño limpio con agua corriente templada y limpie a fondo las superficies del aplicador que entran en contacto con el cliente durante 30 segundos como mínimo. Tenga en cuenta que el paño debe estar húmedo, no mojado.
4. Humedezca un paño limpio con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70% y limpie a fondo las superficies del aplicador que entran en contacto con el cliente durante 30 segundos como mínimo.
5. Deje secar por completo las superficies del aplicador antes de volver a utilizarlo, ya sea al aire o mediante un paño absorbente que no desprenda pelusa.



(continuación)

## Desinfección del aplicador

1. Después del uso, limpie las superficies que entran en contacto con el cliente mediante un paño limpio humedecido con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, siguiendo las instrucciones del fabricante. Deseche el paño sucio.
2. A continuación, humedezca un paño limpio con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, y limpie a fondo la superficie que entra en contacto con el cliente durante dos (2) minutos. A continuación, deje el paño en contacto permanente con las superficies que se están limpiando durante al menos ocho (8) minutos. Deseche el paño después de utilizarlo.
3. Inspeccione visualmente la superficie para comprobar que se haya eliminado toda la suciedad adherida. Repita el proceso de limpieza si es necesario.
4. Deje secar por completo las superficies del aplicador antes de volver a utilizarlo, ya sea al aire o mediante un paño que no desprenda pelusa.

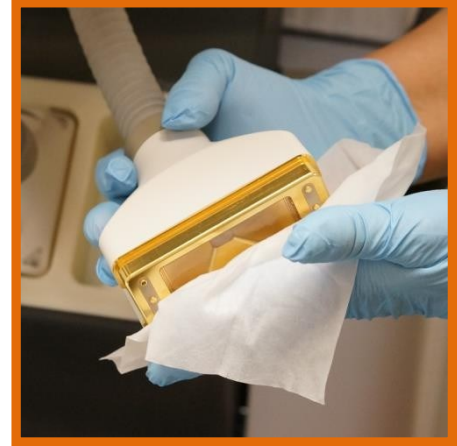

## Limpieza de la base.

1. Limpie la base después de cada uso.
2. Después del uso, limpie las superficies interior y exterior de la base con un paño limpio humedecido con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, siguiendo las instrucciones del fabricante. Deseche el paño sucio.
3. A continuación, humedezca un paño limpio con alcohol isopropílico (isopropanol) del 70%, como la solución alcohólica estéril Steris Septihol, y limpie a fondo la superficie interior de la base durante dos (2) minutos. Deseche el paño después de utilizarlo.
4. Inspeccione visualmente la superficie para comprobar que se haya eliminado toda la suciedad adherida. Repita el proceso de limpieza si es necesario.
5. Deje secar por completo las superficies de la base antes de insertar el aplicador, ya sea al aire o mediante un paño que no desprenda pelusa.